

**NOTICE D'UTILISATION MASQUES GRAND PUBLIC FILTRATION SUPÉRIEURE A 90%
CORRESPONDANT À LA CATÉGORIE 1 EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS À DES USAGES NON SANITAIRES**
Suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020, modifiée le 28 janvier 2021

MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

DOMAINE D'UTILISATION :

Les masques « grand public » sont principalement destinés à des individus dans le cadre de leur activité professionnelle et peuvent également être proposés au plus grand nombre. Ils permettent de renforcer la protection de l'ensemble d'un groupe portant ces masques, notamment des collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Le port d'un masque « grand public filtration supérieure à 90% » est une mesure complémentaire de la stricte application des mesures de distanciation physique, du respect des gestes barrières et des mesures d'organisation du travail. Dans le milieu professionnel, leur utilisation doit s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre des principes énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. **Ces masques sont réservés à un usage hors du système de santé.**

Photo non contractuelle (modèle adulte)



Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical répondant à des exigences de sécurité et de santé européennes qui sont vérifiées par la norme NF EN 14683 (masques de type chirurgical), ni un Equipement de Protection Individuelle répondant à des exigences de sécurité et de santé européennes qui sont vérifiées par la norme NF EN 149 (masques de protection respiratoire FFP).

PERFORMANCES :

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Masque "grand public filtration supérieure à 90%" correspondant à la catégorie 1 définie par la note d'information du 29 mars 2020, modifiée le 28 janvier 2021 : masque individuel proposé, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, **aux professionnels comme à la population générale.**



- Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2412/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1) et qui supporte 50 lavages, testé dans le laboratoire IFTH, 93 chemin des Mouilles, 69134 Ecully Cedex (rapport IFTH 2020-04-21-037-2 du 5 juin 2020).

UTILISATION :

- **La durée de port est inférieure à 4 heures**
- Le design a été établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

COMPOSITION :

- Couche 1 : côte 1x1 jauge 18- 100 % coton- 200 g/m²
- Couche 2 : 100 % PES- 150 g/m²
- Couche 3 : côte 1x1- jauge 18- 100 % coton- 200 g/m²



COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

- Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière la tête pour le modèle adulte ou derrière les oreilles pour le modèle enfant.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

- Évitez de le toucher et de le déplacer.
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

- Quand vous avez porté le masque 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Quand il devient difficile de respirer.
- Si le masque s'humidifie.
- Si le masque est endommagé.
- Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
- En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

- **Lavez le masque en machine pendant au moins 30 min à 40°C minimum ou à la main avec du savon pour un usage ménager.** Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
- **Ce masque a été testé pour 50 lavages.** Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
- Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette.



Après le lavage :

- Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
- Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- **Repassez votre masque à la vapeur à une température de 120°C (fer 1 point ou 2 points).**
- Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

AVERTISSEMENT :

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Les rapports d'essais des matériaux, la notice d'utilisation des masques et un tableau de décompte d'utilisation des masques sont disponibles sur le site www.armorlux.com/masques