

## DÉCOMPTÉ D'UTILISATION DES MASQUES



Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases.  
**Les masques doivent impérativement être lavés avant la première utilisation.**

	Utilisation 01	Utilisation 02	Utilisation 03	Utilisation 04	Utilisation 05	Utilisation 06	Utilisation 07	Utilisation 08	Utilisation 09	Utilisation 10	Utilisation 11	Utilisation 12	Utilisation 13	Utilisation 14	Utilisation 15	Utilisation 16	Utilisation 17	Utilisation 18	Utilisation 19	Utilisation 20	Utilisation 21	Utilisation 22	Utilisation 23	Utilisation 24	Utilisation 25	Utilisation 26	Utilisation 27	Utilisation 28	Utilisation 29	Utilisation 30	Utilisation 31	Utilisation 32	Utilisation 33	Utilisation 37	Utilisation 38	Utilisation 39	Utilisation 40	Utilisation 41	Utilisation 42	Utilisation 43	Utilisation 44	Utilisation 45	Utilisation 46	Utilisation 47	Utilisation 48	Utilisation 49	Utilisation 50					
Masque 01																																																				
Masque 02																																																				
Masque 03																																																				
Masque 04																																																				
Masque 05																																																				
Masque 06																																																				
Masque 07																																																				
Masque 08																																																				
Masque 09																																																				
Masque 10																																																				

### COMMENT ENTREtenir LE MASQUE :

#### Avant ouverture :

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.  
 Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

#### Pour le lavage :

- **Lavez le masque en machine pendant au moins 30 min à 40°C minimum ou à la main avec du savon pour un usage ménager.** Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge ;
- Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique ;
- Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie ;
- Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette nasale et en reformant les plis sans forcer ;

#### Après le lavage :

- Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches) ;
- Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté ;
- **Repassez votre masque à la vapeur à une température de 120°C (fer 1 ou 2 points) ;**
- Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

### SÉCURITÉ :

- Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
- La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m<sup>-2</sup>.s<sup>-1</sup> et doit permettre son port pour une durée de 4h.

